

NAVI® NaCl

5% PF

NOVAX®
PHARMA

GOTAS OFTÁLMICAS - Sin conservante

Solución Oftálmica hipertónica
Alivio temporal del edema de córnea

ES

COMPOSICIÓN:

Cloruro de sodio 5%, Hialuronato de sodio 0,3%, P-Plus™, Cloruro de potasio, Cloruro de Calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato y agua purificada.

DESCRIPCIÓN:

NAVI®NaCl 5% PF es una solución oftálmica hipertónica diseñada para reducir los síntomas del edema corneal. La solución contiene una elevada concentración de **cloruro de sodio**, que crea una película lagrimal hipertónica que extrae el exceso de fluido de la córnea por efecto osmótico, y, por tanto, proporciona un alivio temporal de los síntomas de edema.

El edema corneal es una inflamación de la córnea posterior a cirugía ocular, trauma, infección, e inflamación, así como un efecto secundario de diferentes patologías oculares. El edema corneal puede ser consecuencia también de un uso excesivo de determinados tipos de lentes de contacto.

La asociación de **P-Plus™** y **Hialuronato de Sodio** ayuda a mantener la superficie de los ojos hidratada y proporciona un alivio prolongado a los ojos secos y doloridos.

La tecnología OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) permite la aplicación de una solución oftálmica estéril libre de conservantes.


INDICACIONES:

NAVI®NaCl 5% PF funciona creando una película lagrimal hipertónica, de manera que extrae agua del interior de la córnea. Se utiliza como alivio temporal en caso de edema de córnea.

CONTRAINDICACIONES:

- No utilizar en caso de hipersensibilidad específica a alguno de sus componentes.
- **No compatible con lentes de contacto.**
Retire los lentes de contacto antes de usar.

INSTRUCCIONES DE USO:

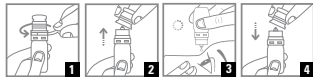

1. Antes de utilizar sus gotas oftálmicas por primera vez, retire el cierre de seguridad tirando del mismo.
2. Quite el tapón.
- 3a. Antes de utilizar sus gotas por primera vez, gire la botella hacia abajo y apriete la botella suavemente hasta que caigan algunas gotas sobre un pañuelo.

- 3b. Para aplicar una gota en el ojo, tire la cabeza hacia atrás, coloque el envase boca abajo sobre el ojo, baje el párpado inferior y apriete suavemente el envase hasta que caiga una gota sobre el ojo. Suelte el párpado y cierre el ojo durante 1 ó 2 minutos para evitar que la solución salga fuera de éste.

Instile 1 ó 2 gotas en la bolsa de los ojos afectados y repita estos pasos 3 veces al día o según le indique su especialista.

4. Después de cada uso, vuelva a colocar el tapón en el envase.
5. Espere al menos 10-15 minutos antes de utilizar cualquier otro producto oftálmico o siga las instrucciones de su médico.

ADVERTENCIAS:

- Utilizar únicamente bajo el consejo y supervisión de su oftalmólogo.
- **El uso de este producto puede causar una sensación de escozor e irritación temporal. Si el problema persiste, por favor consulte a su médico.**
- Para prevenir cualquier posible contaminación, no permita que la punta del envase entre en contacto con ninguna superficie ni con el ojo.
- No ingiera la solución.
- Manténgase fuera de la vista y el alcance de los niños.
- No utilice la solución después de la fecha de caducidad.
- Una vez abierta la botella, la solución se debe utilizar durante los siguientes 90 días.
- No utilizar si la botella está dañada.
- **No exponer a la luz directa del sol.**
- En caso de edema postquirúrgico, utilizar únicamente bajo indicación de su médico.

CONSERVACIÓN:

- Conserve el producto entre 5 y 35°C y protegido de la luz solar.

10 ml

REF D10NCF266

Distribuidor en España:
Laboratorios LLORENS, S.L.
C/ Ciudad de Balaguer, 7-11
08022 Barcelona - España

NOVAX® PHARMA
Le Coronado
20, Av. de Fontvieille
MC 98000 MONACO
www.novaxpharma.com



STERILE A
051

V2 - Rev. 10/09/2018


COMPOSIÇÃO:

Cloreto de Sódio a 5%, Hialuronato de Sódio a 0,3%, P-Plus™, Cloreto de Potássio, Cloreto de Cálcio Dihidratado, Cloreto de Magnésio Hexahidratado e Água purificada.

DESCRIÇÃO:

NAVI® NaCl 5% PF é uma solução oftálmica hipertónica concebida para reduzir os sintomas do edema da córnea. A solução contém uma alta concentração de **Cloreto de Sódio**, que retira o excesso de fluido para fora da córnea por um efeito osmótico e assim proporciona um alívio temporário dos sintomas do edema.

O edema da córnea é um aumento da córnea após cirurgia ocular, traumatismo, infeção e inflamação assim como um resultado secundário a várias doenças oculares. O edema da córnea também pode ocorrer após o sobre uso de certo tipo de lentes de contacto.

A combinação de **P-Plus™** e **Hialuronato de Sódio** ajuda a manter a superfície dos olhos hidratada e proporciona um alívio duradouro a olhos doridos e secos.

A tecnologia OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) permite a administração inovadora de uma solução oftálmica estéril isenta de conservantes.

INDICAÇÕES:

NAVI® NaCl 5% PF atua criando uma película lacrimal hipertónica, removendo assim água da córnea. Deve ser usado para alívio temporário em caso de edema da córnea.

CONTRAINDICAÇÕES:

- Não usar se for sensível a qualquer um dos ingredientes.
- **Não compatível com lentes de contacto.**
- Remova as lentes de contacto antes de usar.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:


1. Antes de usar a solução oftálmica pela primeira vez, remova o anel inviolável, puxando-o.
2. Retire a tampa.
- 3a. Antes de usar a solução oftálmica pela primeira vez, vire o frasco ao contrário e aperte-o lentamente até que caiam algumas gotas sobre um lenço de papel.
- 3b. Para colocar uma gota no(s) olho(s), incline a cabeça para trás, vire o frasco ao contrário por cima do olho, puxe a pálpebra inferior e aperte lentamente o frasco até cair

uma gota no(s) olho(s). Solte a pálpebra e feche os olhos durante 1 a 2 minutos para impedir que a solução escorra. Instile 1 ou 2 gotas na bolsa do(s) olho(s) afetado(s) e repita estes passos 3 vezes por dia ou como recomendado pelo seu oftalmologista.

4. Após a utilização, volte a colocar a tampa no frasco de solução.
5. Aguarde pelo menos 10-15 minutos antes de usar qualquer outros produtos oftálmicos ou siga as instruções do seu médico.

PRECAUÇÕES:

- Utilizar apenas sob orientação e supervisão do seu oftalmologista.
- **O uso deste produto pode provocar ardor e irritação ocular temporários. Se o problema persistir, consulte o seu médico.**
- Para evitar uma possível contaminação, não deixe que a ponta do conta-gotas entre em contacto com qualquer superfície ou com o olho.
- Não ingerir a solução.
- Manter fora da vista e do alcance das crianças.
- Não utilizar após o prazo de validade.
- Após a abertura do frasco, a solução deve ser usada num prazo de 90 dias.
- Não utilizar se o frasco estiver danificado.
- **Não expor à luz solar direta.**
- Em caso de edema da córnea após cirurgia, utilizar apenas sob recomendação médica.

CONSERVAÇÃO:

- Conservar entre 5 e 35°C e proteger da luz solar.

10 ml
REF D10NCF266


Distribuidor em Portugal:

Visuall, Produtos e Equipamentos Médicos, Lda.
 Rua das Amoras, 157 - 6º. Esq.
 2775-549 Carcavelos - Cascais
 PORTUGAL



Le Coronado
 20, Av. de Fontvieille
 MC 98000 MONACO
 www.novaxpharma.com


STERILE | A

0051

V2 - Rev. 10/09/2018