

# VERBALUX® GOTAS OFTÁLMICAS



PF

Con acción lubricante y protectora que ayuda a la cicatrización de la córnea. Sin fosfatos ni conservantes.

ES

## COMPOSICIÓN

**Hialuronato sódico reticulado a 0,3%, P-Plus™**, extracto seco de **Verbascósido**, cloruro potásico, cloruro cálcico, cloruro magnésico, cloruro sódico, hidróxido potásico, ácido bórico y tetraborato sódico.

## DESCRIPCIÓN

**VERBALUX® PF** es una solución ocular refrescante y lubricante que contiene dos polímeros naturales: **Hialuronato sódico reticulado y P-Plus™**.

También contiene **Verbascósido** un potente antioxidante que protege los tejidos y fluidos oculares de la oxidación natural de la córnea.

Gracias a la combinación de un potente antioxidante como el **Verbascósido**, el **P-PLUS™** y el **hialuronato sódico reticulado** se mejora el proceso fisiológico de cicatrización de la córnea.

La acción protectora de **VERBALUX® PF** se ha probado in vitro. **La prueba muestra una reducción considerable del estrés oxidativo provocado por la contaminación.**

La presencia de **electrolitos** (Cl<sup>-</sup>, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Ca<sup>++</sup> and Mg<sup>++</sup>) es imprescindible para los procesos bioquímicos celulares, y ayuda a mantener la superficie ocular en buenas condiciones fisiológicas.

**La tecnología OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) permite aplicar la solución ocular estéril y sin conservantes de forma innovadora.**

## INDICACIONES

### Efecto barrera anticontaminación:

- Alivia el ardor y la irritación oculares debidos a la exposición a factores contaminantes.
- Actúa como protector para prevenir la irritación y aliviar la sequedad ocular.


### Efecto lubricante:

- Cuando se aplica en el ojo, **VERBALUX® PF** se mezcla con las lágrimas y forma una película viscosa y transparente que ayuda a reducir la fricción causada por el parpadeo, y protege la superficie de la córnea. Reduce la sensación de ardor, el dolor y las molestias de los ojos llorosos.
- Favorece el proceso fisiológico de cicatrización de las heridas y abrasiones de la córnea, en particular en caso de traumatismos o intervenciones quirúrgicas. **VERBALUX® PF** está especialmente indicado para pacientes con riesgo de infección.

**VERBALUX® PF no contiene conservantes ni fosfatos.**

**VERBALUX® PF es compatible con todo tipo de lentillas.**

## INDICACIONES DE USO

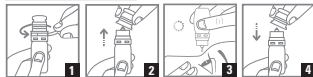

1. Para abrir el frasco por primera vez, tire del anillo de seguridad para quitarlo.

2. Quite el tapón.

**3a.** Antes de utilizar las gotas por primera vez, ponga el frasco boca abajo y apriételo lentamente hasta que caigan unas gotas sobre un pañuelo de papel.

**3b.** Para echar una gota en los ojos, ponga el frasco boca abajo sobre del ojo y apriételo lentamente hasta que caiga una gota en los ojos.

Aplique 1 o 2 gotas en cada ojo, unas 3 a 6 veces al día, o según los consejos del oftalmólogo.

4. Cada vez que termine de utilizar las gotas vuelva a ponerle el tapón al frasco.

## ADVERTENCIAS

- No utilizar simultáneamente con otras gotas.
- Para evitar una posible contaminación, no deje que la punta del gotero toque ninguna superficie ni el ojo.
- No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes.
- En algunos casos de ligera sensibilidad, la aplicación de las gotas puede provocar un pequeño escozor o irritación que desaparece después de parpadear.
- Si la irritación ocular persiste y experimenta dolor, enrojecimiento o cambios en la visión tras la aplicación, hable con su médico.
- No ingiera la solución.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilice la solución después de la fecha de caducidad.
- Una vez abierto el frasco, la solución debe utilizarse en un plazo de 90 días.
- No utilizar si la botella presenta desperfectos.
- **No exponer a la luz solar directa.**

## ALMACENAMIENTO

- Conservar el frasco entre 5 y 35 °C.

10 ml

REF D10VX419

STERILE A



SIN FOSFATOS

**Distribuidor en España:**  
**Laboratorios LLORENS, S.L.**  
C/ Ciudad de Balaguer, 7-11  
08022 Barcelona - ESPAÑA

## Fabricante:

**NOVAX® PHARMA**  
Le Coronado  
20, Av. de Fontvieille  
MC 98000 MONACO  
www.novaxpharma.com

CE  
0051

V1 - Rev. 19/10/2020

# VERBALUX® GOTAS OFTÁLMICAS

NOVAX®  
PHARMA

PF

Ação lubrificante e de proteção que ajuda a cicatrização da córnea. *Sem fosfatos e sem conservantes.*

PT

## COMPOSIÇÃO

**Hialuronato de sódio reticulado a 0,3%, P-Plus™, extrato seco de Verbascosídeo**, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio, hidróxido de potássio, ácido bórico e tetraborato de sódio.

## DESCRIÇÃO

**VERBALUX® PF** é uma solução oftálmica refrescante e lubrificante que contém dois polímeros naturais: **Hialuronato de sódio reticulado e P-Plus™**.

Também contém **Verbascosídeo** um antioxidante forte capaz de proteger o tecido e os fluidos oculares da oxidação natural da córnea.

A associação de um antioxidante forte, como **Verbascosídeo, P-Plus™ e Hialuronato de sódio reticulado** ajuda o processo fisiológico de cicatrização da córnea.

A ação de proteção de **VERBALUX® PF** foi testada in vitro.

**O teste demonstrou a redução substancial do stress oxidativo provocado pela poluição.**

A presença de **eletrólitos** (Cl<sup>-</sup>, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Ca<sup>++</sup> and Mg<sup>++</sup>), é fundamental para os processos bioquímicos celulares e ajuda a manter a superfície ocular em boas condições fisiológicas.

**A tecnologia OSD (do inglês Ophthalmic Squeeze Dispenser)** permite a inovadora administração de uma solução oftálmica estéril, sem de conservantes.

## INDICAÇÕES

### Efeito de barreira anti-poliuição:

- Proporciona um alívio do ardor e irritação dos olhos devido a exposição a fatores de poluição.
- Atua como um protetor para evitar a irritação e proporcionar alívio de condições de olho seco.


### Efeito lubrificante:

- Quando **VERBALUX® PF** é aplicado no olho mistura-se com o filme lacrimal e forma um filme viscoso e transparente que ajuda a reduzir a fricção causada pelo pestanejo e protege a superfície da córnea. Reduz a sensação de ardor, dor e desconforto dos olhos lacrimejantes.
- Ajuda o processo fisiológico de cicatrização de feridas e abrasões da córnea, nomeadamente em caso de eventos traumáticos ou procedimentos cirúrgicos. A utilização de **VERBALUX® PF** é particularmente indicada para pacientes com risco de infeção.

**VERBALUX® PF não tem conservantes nem fosfatos.**

**VERBALUX® PF é compatível com todos os tipos de lentes de contacto.**

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

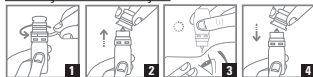

1. Antes de usar as gotas oculares pela primeira vez, remova o anel inviolável puxando-o.

2. Retire a tampa.

3a. Before using your eye drops for the first time, turn the bottle up side down, and slowly squeeze the bottle until a few drops come out onto a tissue.

3b. Para administrar uma gota no(s) olho(s), vire o frasco para baixo por cima do olho, e pressione lentamente o frasco até que uma gota caia no(s) olho(s). Instilar 1 ou 2 gotas em cada olho, 3 a 6 vezes por dia ou de acordo com a recomendação de um especialista.

4. Depois de usar, reponha a tampa no frasco de solução oftálmica.

## ADVERTÊNCIAS

- Não usar simultaneamente com outra solução oftálmica.
- Para prevenir uma eventual contaminação, não deixe a ponta do conta-gotas entrar em contacto com o olho ou qualquer superfície.
- Não utilizar em caso de hipersensibilidade específica a qualquer um dos constituintes.
- Em alguns casos, uma ligeira sensibilidade pode causar um breve ardor ou irritação após a instilação, que desaparece após pestanejar.
- Se a irritação ocular persistir e sentir dor, vermelhidão ou alteração da visão após a instilação, consulte o seu especialista.
- Não ingerir a solução.
- Manter fora da vista e do alcance das crianças.
- Não utilizar a solução após o prazo de validade.
- Após a abertura do frasco, a solução deve ser usada num prazo de 90 dias.
- Não utilizar se o frasco estiver danificado.
- **Não expor à luz solar direta.**

## ARMAZENAMENTO

- Armazenar o frasco entre 5 e 35 °C.

10 ml

REF D10VX419



NOVAX®PHARMA  
Le Coronado  
20, Av. de Fontvieille  
MC 98000 MONACO  
www.novaxpharma.com

CE  
0051

V1 - Rev. 19/10/2020